



Padded Transfer Belt SIDE RELEASE BUCKLE

Ceinture de marche rembourrée
avec boucle à déclenchement latérale



Assist patient transfers with comfort, dignity and safety for both attendant and patient. Padded area is 5.5" wide (13cm) and lined with Bucktex for soft, breathable comfort. Four handle loops for convenient, safe grip points. Colour coded for quick identification in the rehab department.

Pour assister au déplacement d'un patient avec confort, dignité et sécurité autant pour la personne qui assiste que pour le patient. La section rembourrée est 5,5 po de large (13 cm) et est munie d'une doublure en Bucktex pour ajouter douceur et confort. Quatre poignées pour assurer une prise sécuritaire et commode. Couleur codée pour identification rapide dans un centre de rééducation.

Available in three sizes Offerts en trois grandeurs

17S140S

Small/Blue - 24 to 30 in (60 -76 cm)
Petit/Bleu - 24 à 30 po (60-76 cm)

17S140M

Medium/Green - 28 to 48 in (71-122cm)
Moyen/Vert - 28 à 48 po (71-122 cm)

17S140L



Large/Black - 40 to 64 in (102 - 162 cm)
Large/Noir - 40 à 64 po (102-162 cm)

Face patient. Position belt around the patient's mid section with the attendant's handles in the back.

Attendant holds handles in hands. Guide patient unobtrusively, being prepared to assist patient firmly if necessary.

Face à face avec votre patient, positionnez la ceinture autour de sa taille avec les poignées à l'arrière.

La personne qui assiste prend les poignées dans ses mains et guide le patient discrètement en étant prêt à l'assister fermement si nécessaire.

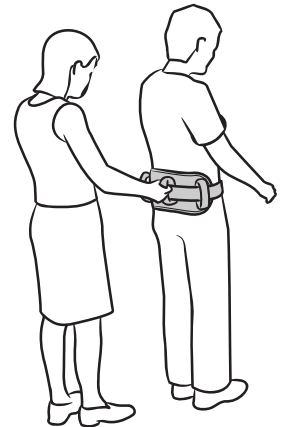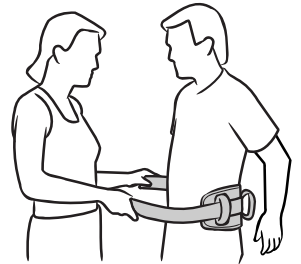

Care: To clean padded belt, hand wash with mild detergent. Air dry.

Entretien : Pour nettoyer la ceinture rembourrée, laver à la main avec un détergent doux. Sècher à l'air.

Limited One Year Warranty

Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is free from defects in material and workmanship for one year from date of purchase. This warranty is offered provided the product has not been abused, misused, altered or damaged after purchase. (This includes damage due to the use of harsh chemicals.)

Garantie limitée d'un an

Parsons ADL garantit au propriétaire d'origine du présent produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'une année à compter de la date d'achat. Cette garantie est offerte à condition que le produit n'ait pas été utilisé abusivement, mal utilisé, modifié ou endommagé après l'achat. (Ceci comprend les dommages résultant de l'utilisation de produits chimiques puissants.)

Parsons ADL Inc. 1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada

Tel: 905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com



Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne