



Padded Transfer Belt AUTO BUCKLE

Assist patient transfers with comfort, dignity and safety for both attendant and patient. Padded area is 5.5" wide (13cm) and lined with Bucktex for soft, breathable comfort. Four handle loops for convenient, safe grip points. Colour coded for quick identification in the rehab department.



PLEASE NOTE:
This belt is meant to be used to assist in a patient transfer and is not meant to bear the full weight of a patient who does not have the ability to stand for a transfer.

Veuillez prendre note : Cette ceinture est conçue pour faciliter le transfert d'un patient et ne doit pas supporter le poids total d'un patient qui n'est pas capable de se mettre debout pour un transfert.

Ceinture de marche rembourrée avec boucle style automobile

Pour assister au déplacement d'un patient avec confort, dignité et sécurité autant pour la personne qui assiste que pour le patient. La section rembourrée a 5,5 po de large (13 cm) et une doublure en Bucktex pour ajouter douceur et confort. Quatre poignées verticales rembourrées et trois poignées horizontales en sangle pour assurer une prise sécuritaire et commode. Couleur codée pour identification rapide dans un centre de rééducation.

Available in three sizes Offerts en trois grandeurs

17S141S

Small/Blue - 24 to 30 in (60 -76 cm)
Petit/Bleu - 24 à 30 po (60-76 cm)

17S141M

Medium/Green - 28 to 48 in (71-122cm)
Moyen/Vert - 28 à 48 po (71-122 cm)

17S141L

Large/Black - 40 to 64 in (102 - 162 cm)
Large/Noir - 40 à 64 po (102-162 cm)

Limited One Year Warranty

Parsons ADL warrants to the original owner of this product that it is free from defects in material and workmanship for one year from date of purchase.

Garantie limitée d'un an

Parsons ADL garantit au propriétaire d'origine du présent produit que celui-ci est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une durée d'une année à compter de la date d'achat.

Instructions

Face patient. Position belt around the patient's mid section with the attendant's handles in the back.



Attendant holds handles in hands. Guide patient unobtrusively, being prepared to assist patient firmly if necessary.

Care: To clean padded belt, hand wash with mild detergent. Air dry.

Face à face avec votre patient, positionnez la ceinture autour de sa taille avec les poignées à l'arrière.

La personne qui assiste prend les poignées dans ses mains et guide le patient discrètement en étant prêt à l'assister fermement si nécessaire.

Entretien: Pour nettoyer la ceinture rembourrée, laver à la main avec un détergent doux. Sècher à l'air libre.

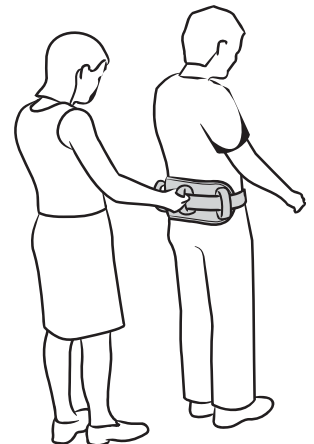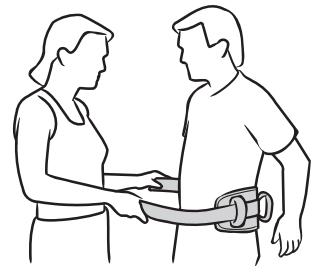

www.parsonsadl.com

Parsons ADL Inc. 1986 Sideroad 15, Tottenham, Ontario L0G 1W0 Canada

Tel: 905.936.3580 - 1.800.263-1281 / Fax: 905.936.3585 - 1.888.225.5535

Email: custserv@parsonsadl.com

Aids to Daily Living - Accessoires à la vie quotidienne

